

Testi i alergjisë



Test me një pikë gjaku



Rezultatet për 30 minuta



Saktësi mbi 96%

Shikoni udhëzimet në format video →



Çfarë është testi i alergjisë Newfoundland?

Testi i alergjisë Newfoundland zbulon nivele të larta të antitropave alergjikë të quajtur imunoglobulina E (IgE) në gjak. Nivelet e larta të IgE tregojnë një reaksion alergjik. Testi i alergjisë Newfoundland zbulon alergjitë ndaj maceve, morrave shtëpiake dhe polenit të barit, të njohur si ethet e barit. <https://www.newfoundland.io/tests/allergy>

Për kë është i destinuar testi i alergjisë Newfoundland?

Për njerëzit që duan të dinë nëse kanë alergji ndaj maceve, pluhurit ose polenit të barit (ethet e barit).

Simptomat e një reaksioni alergjik mund të përfshijnë:

- Rrjedhje hundësh ose teshtitje
- Dhimbje ose ndjeshmëri të rritur rreth faqeve, syve ose ballit
- Kollitje, gulçim ose vështirësi në frymëmarrje
- Të kruar ose skuqjen e lëkurës

Masat Paraprake

1. Lexoni me kujdes udhëzimet para përdorimit. Përdorimi i papërshtatshëm mund të çojë në rezultate jo të besueshme.
2. Mos e përdorni pas datës së skadimit ose nëse paketimi është i dëmtuar. Testi duhet të mbetet në qesen e mbyllur deri në përdorim.
3. Ruajeni kompletin e testimit në një temperaturë midis 4°C dhe 25°C. Mos e ngrini.
4. Testi duhet të përdoret brenda 30 minutash nga hapja e paketës prej alumini.
5. Mos hani, mos pini dhe mos pini duhan në zonën ku trajtohen mostrat ose kompletet.
6. Përdoret për vetë-testim me qëllim të diagnostikimit in vitro. Nuk mund të ripërdoret.
7. Testi është për përdorim të jashtëm. Mos e gëlltitni.
8. Mbajeni larg fëmijëve.
9. Në rast të fëmijëve nën 16 vjeç, testi duhet kryer nga një i rritur (18+).
10. Trajtojeni me kujdes. Për të hedhur kompletin e testimit, përmbytja e testit dhe kutitë duhet të vendosen në mënyrë të sigurt në kosh dhe të hidhen bashkë me mbeturinat shtëpiake.


Materialët në paketim



Testi



Tubi për transferimin e gjakut

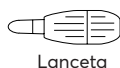

Lançeta



Udhëzimet e përdorimit

Materiali i nevojshëm që nuk është furnizuar:

- Kohëmatës
- Facoletë e pastër dhe e thatë

Udhëzimet

Për të parë mënyrën e përdorimit me video, skanoni kodin QR më sipër ose vizitoni <https://www.newfoundland.io/tests/allergy> për videon tonë më udhëzime.


Përgatitja:

1. Lani duart me sapun dhe ujë të ngrohtë, pastaj thajini.
2. Hiqni testin nga paketa prej alumini dhe vendoseni në një sipërfaqe të pastër dhe të sheshtë. Pastaj hapni paketimin që përmban lançetën, tubin e transferimit të gjakut dhe shishkën me tretësirën e zhvillimit.



Marrja e mostrave të gjakut:

3. Mbani lançetën dhe rrotulloni mbulesën blu për ta hequr, duke zbuluar pjesën e bardhë të kontaktit më poshtë. Paralajmërim: Mos e përdorni lançetën nëse mungon pjesën blu me shenjën. ↔
4. Masazhoni dorën nga kyçi i dorës deri në majat e gishtërinjve për të stimuluar qarkullimin e gjakut.

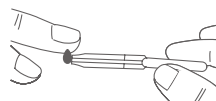


5. Duke mbajtur anët e dhëmbëzuara të lançetës midis gishtit të madh dhe gishtit tregues të dorës së lirë, shtypni pjesën e bardhë të kontaktit fort kundër sipërfaqes së butë të majës së gishtit derisa të dëgjoni një klik. Gjilpëra tërhiqet menjëherë dhe nuk mund të ripërdoret.
6. Fshini pikën e parë të gjakut me një facoletë të pastër.

7. Mblidhni pikën e dytë të gjakut duke përdorur tubin për transferimin e gjakut. Shënim: Ju lutemi të lexoni udhëzimet për përdorimin e tubit të transferimit të gjakut para se ta përdorni:
 - a. Sigurohuni që thoi i gishtit të jetë i drejtuar lart.
 - b. Mbajeni tubin për transferimin e gjakut horizontalisht dhe, PA shtypur, prekni pikën e gjakut me majën e tubit.
 - c. Forca kapilare do të tërheqë automatikisht mostrën e gjakut. Ndoshta duhet të masazhoni përsëri gishtin nëse ka nevojë për më shumë gjak. Mbushni tubin deri në vijën e ngarkimit.


Kryerja e testit:

8. Shtydhni butësisht tubin për të vendosur mostrën e gjakut në vrimën më të vogël në kompletin e testimit me shenjën (simboli i pikës). ⚠️ Paralajmërim: Shtydhni balonën derisa të shkarkohet gjithë gjaku nga tubi kapilar. Nëse gjaku nuk del, vendosni tubin vertikalisht mbi vrimën, duke e mbajtur nga të dyja anët e shenjës së zi të nivelit dhe shtydhni balonën. Nëse nuk vendosni mjaft gjak në vrimën e testit, rezultati mund të jetë i pasaktë.

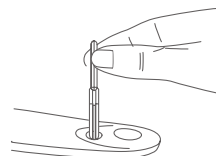


9. Prisni afërsisht 1 minutë që gjaku të absorbohet dhe pastaj hidhni tubin për transferimin e gjakut

10. Hiqni kapakun nga tretësira e zhvillimit dhe hidhni me kujdes gjithë tretësirën në vrimën më të madhe që ndodhet pak poshtë vrimës së mostrës së gjakut. Nisni kohëmatësin për 15 minuta.

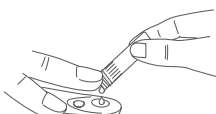


Shënim: Mos e lëvizni dhe mos e ngrini testin pasi të keni shtuar tretësirën e zhvillimit.

11. Pas saktësisht 15 minutash, bëni testin duke e mbajtur horizontalisht dhe lëvizni rrëshqitësin blu derisa të dëgjoni një klik. Treguesi i funksionimit të testit (me shenjën) do të ndryshojë nga blu në të bardhë.

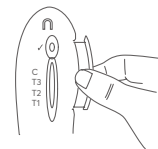

12. Vendosni testin përsëri në një sipërfaqe të sheshtë dhe prisni 30 minuta para se të interpretoni rezultatet.

Shënim: Nëse keni nivele shumë të larta të antitropave IgE, një rezultat pozitiv mund të paraqitet brenda 15 minutash. Sidoqoftë, për të konfirmuar një rezultat krejtësisht negativ duhet të prisni 30 minuta nga momenti ku e keni lëvizur rrëshqitësin blu .

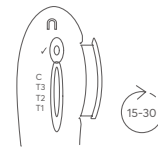

Rezultatet

C	Vija e kontrollit
T3	Poleni të barit (Ethet e polenit)
T2	Morra
T1	Mace

Që testi të jetë i vlefshëm, një vijë e kuqe/rozë duhet të shfaqet pranë vijës së kontrollit (C) në dritaren e rezultatit. Nëse linja e kontrollit nuk shfaqet, rishikoni udhëzimet dhe përsëriteni testin me një komplet të ri testimi. Nëse problemi vazhdon, ju lutemi të kontaktoni support@newfoundland.io. Vija rozë/e kuqe (pavarësisht nga intensiteti) pranë simboleve T1, T2 ose T3 në dritaren e rezultateve tregon se janë zbuluar nivele të larta të antitropave të alergjisë dhe se mund të keni alergji ndaj këtij alergjeni (maces, morrave, polenit të barit). Edhe një vijë e dobët do të konsiderohet pozitive. Nëse nuk ka asnjë vijë pranë simboleve T1, T2 ose T3, rezultati duhet të konsiderohet negativ për atë alergjinë, domethënë kjo alergji nuk është zbuluar.

Pyetjet më të shpeshta

Si funksionon testi?

Nivelet e larta të IgE mund të jenë një tregues i rrezikut të alergjisë, por nivelet e larta të IgE në vetvete nuk mjaftojnë për të diagnostikuar përfundimisht një alergji. Është e rëndësishme që të keni ose të keni pasur simptoma alergjike në mënyrë që një rezultat pozitiv të jetë domethënëse.

Sa i saktë është testi?

Testi i alergjisë Newfoundland ka një saktësi prej më shumë se 96%. Megjithatë, testi është i besueshëm, ka mundësi që të paraqiten pozitive ose negative të rreme.

A mund ta bëj testin në çdo kohë?

Po. Testi mund të përdoret në çdo kohë të vitit dhe nuk është nevojshme që të keni një reaksion alergjik në kohën e testimit. Nuk ka nevojë për të ndërprerë trajtimin me ndonjë ilaç para se të përdorni këtë produkt.

Çfarë të bëj nëse rezultati është pozitiv?

Një rezultat pozitiv do të thotë se niveli i antitropave në gjak ishte më i lartë sesa pragu i pranueshëm (3.5kU/l) dhe tregon një alergji. Ju duhet të kontaktoni mjekun tuaj për të diskutuar rezultatit në mënyrë të hollësishme dhe të bini dakord për kursin më të mirë të trajtimit.

Çfarë të bëj nëse rezultati është negativ?

Një rezultat negativ do të thotë se niveli i antitropave në gjak ishte më i ulët sesa pragu i pranueshëm (0.35kU/l) dhe tregon se mbas gjasash nuk vuani nga një alergji. Megjithatë, kjo nuk përjashton plotësisht rrezikun e zhvillimit të alergjive në të ardhmen.

Çfarë të bëj nëse rezultati është pozitiv, por unë nuk kam simptoma?

Ka njerëz që kanë nivele anormalisht të larta të IgE, por nuk kanë simptoma të dukshme. Kjo mund të jetë pasoja e antitropave mbrojtës (IgG) ose më rrallë e kontaktit me një alergjen problematik, i cili mund të shkaktojë simptoma të tilla. Megjithatë, simptomat mund të zhvillohen më vonë në jetë. Nëse vuani nga një sëmundje reumatike (artriti), duhet theksuar që mund të paraqiten rezultate pozitive shumë të dobëta edhe në qoftë se nuk keni asnjë alergji.

Pajisjet mjekësore brenda kompletit

STERILE R

Lançeta



Becton & Dickinson Company,
1 Becton Drive, NJ, 07417, USA



Direktiva 93/42/EC

EC REP

Becton Dickinson UK Ltd,
Oxford, UK

Tubi i gjakut



Safe-Tec Clinical Products,
142 Railroad Drive, Ivyland, PA 18974, USA



IVD

Direktiva 98/79/EC

EC REP

CEpartner4U BV,
3951 DB Maarn, NL



Testet në një komplet



Limiti i temperaturës

IVD

Për diagnostikim in vitro

LOT

Numri i ngarkesës



Të përdoret deri më

REF

Numri i katalogut



Mos e ripërdorni



Mos e përdorni nëse paketimi është i
dëmtuar

STERILE

Sterilizuar me rrezatim



Lexoni udhëzimet para përdorimit



Shenja CE



Prodhuesi i ligjshëm

EC REP

Përfaqësuesi i autorizuar në
Komunitetin Evropian



Imutest Limited
Wilmslow, Cheshire, SK9 5DQ, UK

EC REP

Advena Ltd. Tower Business Centre
2nd Flr. Tower Street, Swatar, BKR 4013, Malta



0344

newfoundland