

Testi i infeksionit vaginal



Strisho vaginalë



Rezultatet për ≤ 1 min



Saktësi 98%

REF 180013-1

Shikoni udhëzimet në format video →



Çfarë është Testi i Infeksionit Vagjinal Newfoundland?

Ky është një test i pavarur për të përcaktuar pH-në e mostrave të sekrecioneve vagjinale për të ndihmuar në diagnostikimin e infeksioneve vagjinale të zakonshme, duke përfshirë vagjinozën bakteriale. Për më shumë informacion, vizitoni faqen tonë të internetit. <https://www.newfoundland.io/tests/vaginal-infection>

Çfarë janë infeksionet vagjinale?

Një vagjinë e shëndetshme ka një pH pak acid (midis 3,8 dhe 4,5), i cili ruan ekuilibrin midis baktereve të mira dhe të këqija të pranishme në vagjinë. Nëse ka një ndryshim në vlerën e pH-së, kjo mund të sugjerojë se vuani nga vagjinoza bakteriale (BV). Nga ana tjetër, simptoma të tilla si të kruarut ose djegieja në vagjinë ose sekrecionet e bardha të dendura mund të jenë një simptomë të një infeksioni kërpudhor (candida).

Ju mund të zvogëloni mundësitë e infeksionit vaginal dhe të lehtësoni simptomat duke bërë sa vijon:

- Përdorni vetëm ujë dhe sapun të zakonshëm për të larë zonën gjenitale
- Vishni veshje të lirshme dhe rroba të brendshme prej pambuku
- Shmangni deodorantët, banjat dhe dushet vagjinale
- Bëni dush dhe jo banjë

Për kë është është i destinuar Testi i Infeksionit Vagjinal Newfoundland?

Testi i Infeksionit Vagjinal Newfoundland përdoret për të diagnostikuar infeksionet vagjinale dhe për të ndihmuar në zgjedhjen e një kursi të përshtatshëm trajtimi. Simptomat përfshijnë dhimbje, të kruara dhe ndryshime në sekrecionin vaginal.

Reziku i infeksionit vaginal mund të jetë më i madh nëse jeni seksualisht aktiv, përdorni produkte të higjienës vagjinale, merrni antibiotikë ose keni një gjendje mjekësore që ndikon në sistemin tuaj imunitar. Infeksionet vagjinale mund të jenë shumë të rrezikshme për gratë shtatzëna dhe paraqesin rrezik për nënën dhe fetusin. Prandaj, duhet të diskutoni rezultatet e testit me mjekun tuaj.

Masat paraprake

1. Lexoni me kujdes udhëzimet para përdorimit. Përdorimi i papërshtatshëm mund të çojë në rezultate jo të besueshme.
2. Përdoret për vetë-testim me qëllim të diagnostikimit in vitro. Çdo test është vetëm për përdorim të njëhershëm.
3. Mos e përdorni pas datës së skadimit ose nëse paketimi është i dëmtuar. Testi duhet të mbetet në qesen e mbyllur deri në përdorim.
4. Ruajeni kompletin e testimit në një temperaturë midis 2°C dhe 30°C. Mos e ngrini. Lagështia dhe temperatura mund të ndikojnë negativisht në rezultate. The test is for external use only. Do not swallow.
5. Mos hani, mos pini dhe mos pini duhan në zonën ku trajtohen mostrat ose kompletet.
6. Mbajeni larg fëmijëve.
7. Testi është për përdorim të jashtëm. Mos e gëlltitni.
8. Trajtojeni me kujdes. Për të hedhur kompletin e testimit, përmbajtja e testit dhe kutitë duhet të vendosen në mënyrë të sigurt në kosh dhe të hidhen bashkë me mbeturinat shtëpiake.
9. Hiqni tamponin nga paketa menjëherë para përdorimit. Përdorni vetëm tamponin e furnizuar.

Kufizimet

1. Mos e përdorni këtë test brenda 72 orë pas përdorimit të kremrave kontraceptivë dhe pajisjeve mjekësore vagjinale
2. Mos e përdorni këtë test brenda 48 orëve pas marrëdhënies seksuale.
3. Mos e përdorni këtë test gjatë menstruacionit. Pritni 5 ditë pas përfundimit të menstruacionit para se të bëni testin për të parandaluar rezultatet të reme.
4. Disa gra në menopauzë mund të kenë një pH vagjinale të ngritur dhe të marrin një rezultat jonormal edhe në qoftë se nuk kanë një infektion vaginal.
5. Mos bëni dush dhe mos lani zonën gjenitale menjëherë para kryerjes së testit.
6. Ndotja nga urina mund të shkaktojë rezultate të reme.
7. Ky test nuk është i përshtatshëm për fëmijët nën 16 vjeç.
8. Kini kujdes të mos e fusni tamponin më shumë se 5 cm të rekomanduara në mënyrë që të mos rrezikoni çarjen e himenit.
9. Ky test nuk ka për qëllim të zbulojë sëmundjet seksualisht të transmetueshme, të tilla si HIV, klamidia, herpesi, gonorea ose sifilizi.

Përmbajtja



Testi dhe shkalla e ngjyrave



Tampon vaginal



Udhëzimet e përdorimit

Udhëzimet

Për të parë mënyrën e përdorimit me video, skanoni kodin QR më sipër ose vizitoni <https://www.newfoundland.io/tests/vaginal-infection> për videon tonë më udhëzime.

1. Lani duart me ujë të ngrohtë dhe sapun, pastaj thajini me kujdes.




2. Hapni paketimin dhe hiqni tamponin nga qesja. Mos e prekni majën e tamponit.


3. Ndani buzët e vagjinës për të ekspozuar vagjinën. Futni butësisht majën e tamponit afërsisht 5 cm në vagjinë dhe rrotullojeni për afërsisht 10 sekonda. Është shumë e rëndësishme që maja e tamponit të absorbojë mjaft sekrecion vaginal.



4. Nxirrni tamponin nga vagina dhe shtypni majën e tamponit kundër zonës së pH-së të panelit të testimit së paku 5 herë, duke siguruar që të aplikoni një sasi të mjaftueshme të mostrës.

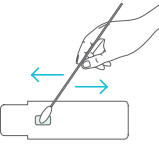

5. Lexoni rezultatin menjëherë ndërsa zona e pH-së është ende e lagur, duke krahasuar ngjyrën në panelin e testit të pH-së me ngjyrat e shkallës që gjenden në qesen prej alumini dhe identifikoni ngjyrën më të afërt. Pas leximit të rezultateve, hidhni panelin dhe tamponin e përdorur.

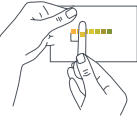


Rezultatet

Intervali normal:

Vlerat e pH vagjinale në intervalin prej 3,8-4,4 janë në intervalin normal. Ngjyra e treguesit është e verdhë-jeshile.

Intervali jonormal:

Kur niveli i pH është mbi 4,4, ngjyra e treguesit është jeshile-blu, duke sugjeruar vagjinozë bakteriale ose trikomoniazë (trichomoniasis vaginalis).

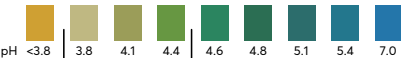

Normal

Pyetjet më të shpeshta

Si funksionon testi?

Testi i Infeksionit Vagjinal Newfoundland është një metodë kimike e thatë për zbulimin e shpejtë gjysmë-sasior të pH-së në mostrat e sekrecionit vaginal. Letra pH përdoret për të përcaktuar nivelin e pH-së në sekrecionin vaginal. Ngjyra do të ndryshojë, sapo tamponi me mostrën të vijë në kontakt me letërën pH. Rezultati konsiderohet ekuivalent me vlerën numerike të ngjyrës në shkallën e ngjyrave që është më e afërta me ngjyrën e marrë me testin.

Sa i saktë është testi?

Testi i Infeksionit Vagjinal Newfoundland ka një saktësi prej 98.6%. Megjithëse testi është i besueshëm, ka mundësi që të paraqiten pozitive ose negative të reme.

A mund ta bëj testin në çdo kohë?

Jo, por ka disa kufizime lidhur me kohën kur duhet të përdoret ky test. Ju lutemi të lexoni seksionin Kufizimet për më shumë informacion.

Çfarë të bëj nëse rezultati është jonormal?

Një PH vagjinale jonormale nuk do të thotë domosdoshmërisht që ju keni një infektion vaginal (shihni seksionin Kufizimet për detaje të mëtejshme). Sidoqoftë, nëse merrni një rezultat që tregon se pH-ja juaj vagjinale është në një interval jonormal, duhet të konsultoheni me mjekun tuaj për këshilla të mëtejshme.

Çfarë të bëj nëse rezultati është normal?

Nëse pH-ja juaj vagjinale është në intervalin normal, kjo tregon se nuk keni një infektion bakterial vaginal. Nëse simptomat vazhdojnë, ju lutemi të konsultoheni me mjekun tuaj.

Cilat janë simptomat e zakonshme të infeksioneve vagjinale?

Ka infeksione vagjinale që nuk shfaqin shpesh asnjë simptomë. Megjithatë, ndonjë nga simptomat e mëposhtme mund të tregojë një infektion vaginal:

- Ndryshimi i ngjyrës, aromës ose konsistencës së sekrecioneve vagjinale
- Dhimbje ose vagjinë e thatë, me të kruara
- Dhimbje gjatë urinimit dhe/ose marrëdhënieve seksuale

Cili është dallimi midis kandidiazës dhe vagjinozës bakteriale?

Kandidiaza është një infektion kërpudhor i shkaktuar nga mbipopullimi i tharmit, i cili rezulton shpesh në simptoma të tilla si të kruara vagjinale, dhimbje dhe sekrecione vagjinale të bardha, të ngjashme me djathin.

Vagjinoza bakteriale shkaktohet nga rritja e tepërt e baktereve që gjenden në vagjinën tuaj në mënyrë në natyrshme. Simptomat përfshijnë zakonisht një erë të ngjashme me erën e peshkut dhe një sekrecion të bardhë-gri të lëngshëm.

Pajisjet mjekësore brenda kompletit

STERILE **R**

Tampon

 Shikoni etiketën e tamponit të përfshirë në komplet.

Tampon
 Shikoni etiketën e tamponit të përfshirë në komplet.

EC REP Qarad EC-REP BV
Pas 257, 2440 Geel, Belgjikë

 Prodhuesi i ligjshëm

180013_IFU_02_5.1 11/2023